

AN LEITUNG

Polygrafie

Wichtige Informationen

Gerät nicht probeweise starten → Das Gerät kann nicht wieder abgeschaltet werden.

- Nagellack oder Fingernagelaufsätze vor der Untersuchung entfernen.
- Sauerstoffsättigungssensor nicht an der gleichen Extremität anlegen wie die Manschette des 24h-Blutdruckgerätes, falls dieses zeitgleich getragen wird.
- Gerät vor dem Zubettgehen montieren und starten.
- Aufnahmezeitdauer max. 8 Stunden, geeignet für Patienten ab 20 kg.
- Gerät nicht in der Nähe von CT, MRI und Röntgen einsetzen.
- Mobiltelefone, starke elektromagnetische Quellen und elektrische Heizdecken können die Qualität der Aufzeichnung beeinflussen.

Patientenprotokoll

Bitte informieren Sie den Patienten über die diagnostische Wichtigkeit, das Patientenprotokoll korrekt und vollständig auszufüllen.

Bitte einen schwarzen Kugelschreiber verwenden, keinen Bleistift. Start und Ende der Registrierung mit Datum und Zeit notieren.

Identifikation und Analyse


- Personalien des Patienten
- Das von Ihnen eingetragene Datum und die genaue Startzeit der Aufnahme
- Die von Viollier eingetragene Geräte- und Fingersensornummer auf dem Auftragsformular

Geräte-Nr. **010**

Fingersensor-Nr. **015**

Bitte benutzen Sie ausschliesslich das beigelegte Auftragsformular, das bereits mit Ihrer Adresse versehen ist.

Anlegen des Gerätes

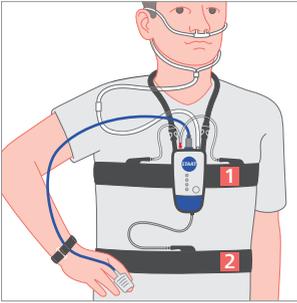


Gerät vor dem Zubettgehen montieren

- Gerät, Brust- und Bauchgurt nicht direkt auf der Haut tragen.
- Nackengurt samt Gerät über den Kopf ziehen.
- Das Gerät mit dem **Brustgurt 1** mittig auf der Höhe des Brustbeins fixieren → bei Männern auf Höhe der Brustwarzen, bei Frauen um den oberen Brustbereich.
- Abdomensensor mit dem **Bauchgurt 2** um den Bauch (auf Höhe des Bauchnabels) ziehen. Die Drucksensoren müssen sich auf der Gurtinnenseite befinden. Beide Gurte straff anziehen, jedoch nicht so eng, dass sie die Atmung einschränken.





- Nasensensor unter der Nase ansetzen. Die **Öffnung 3** in die Nasenlöcher platzieren.
- Kabel hinter die Ohren führen, **Kabelschieber 4** unter dem Kinn anziehen und anpassen.

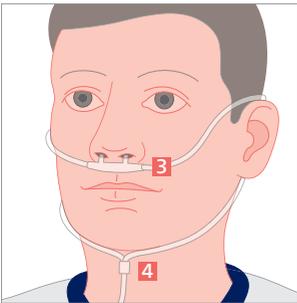

Fingersensor fixieren


- Sauerstoffsättigungssensor mit Fingernagelsymbol nach oben am Finger anbringen. Fingersensor über den Finger ziehen, bis die Fingerkuppe sichtbar ist.
→ Fingersensor **5** darf während der Nacht an einen anderen Finger gewechselt werden.
- Geeignet sind: Zeige-, Mittel-, und Ringfinger (ohne Nagellack).
- Sensorkabel mit dem Klettband am Handgelenk fixieren.

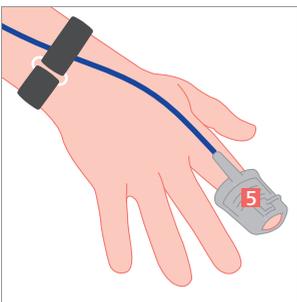

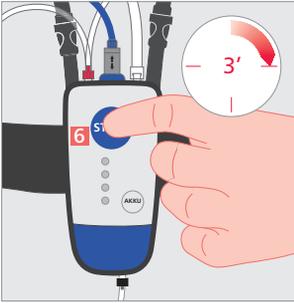


Gerät starten

- Vordere **blaue** Starttaste **6** während 3 Sekunden drücken.
- Während der Aufzeichnung blinkt das **grüne** Licht **7** im vier Sekunden Takt. Wenn daneben ein **rotes** Licht **8** erscheint, ist der Fingersensor nicht korrekt platziert → bitte korrigieren.
- Falls sich der Fingersensor / Nasensensor nachts löst, bitte wieder anlegen.

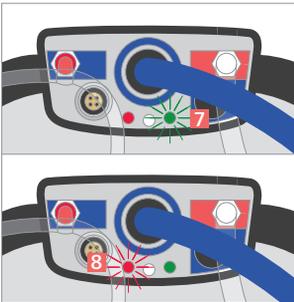

- Am Morgen das Gerät demontieren und zurücksenden.
Gerät schaltet nach 8 Stunden automatisch ab.

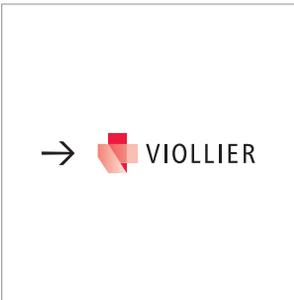



Zubehör

- Gerät mit Tasche und verstellbarem Nackengurt
- Verstellbarer Brust- und Bauchgurt (lang) sowie Klettband (kurz) für Fixation am Handgelenk
- Sauerstoffsättigungssensor mit eingestecktem Verbindungskabel (mit integriertem Thorax- und Abdomensensor)
- Nasensensor mit eingestecktem Verbindungskabel
- Auftragsformular, Patientenprotokoll und Anleitung
- Roter Verschlussclip für die Rücksendung

Rücksendung

Bitte senden Sie uns nach Beendigung der Aufnahme das Gerät mit eingesteckten Kabeln, Gurten, Klettband, Thorax- und Abdomensensor, Sauerstoffsättigungssensor, Auftragsformular und Patientenprotokoll zurück.

- per Kundendienst
- per Post

Bitte beachten Sie für die Rücksendung des Koffers:

- Etiketle aus Sichtfeld ziehen und wenden
→ Adresse Viollier AG wird sichtbar
- Etiketle wieder in das Sichtfeld einschieben
- Koffer mit rotem Verschlussclip schliessen
- Viollier übernimmt die Frankatur



