


¹³C Atemtest – Helicobacter pylori

¹³C Atemtest-Set (56)

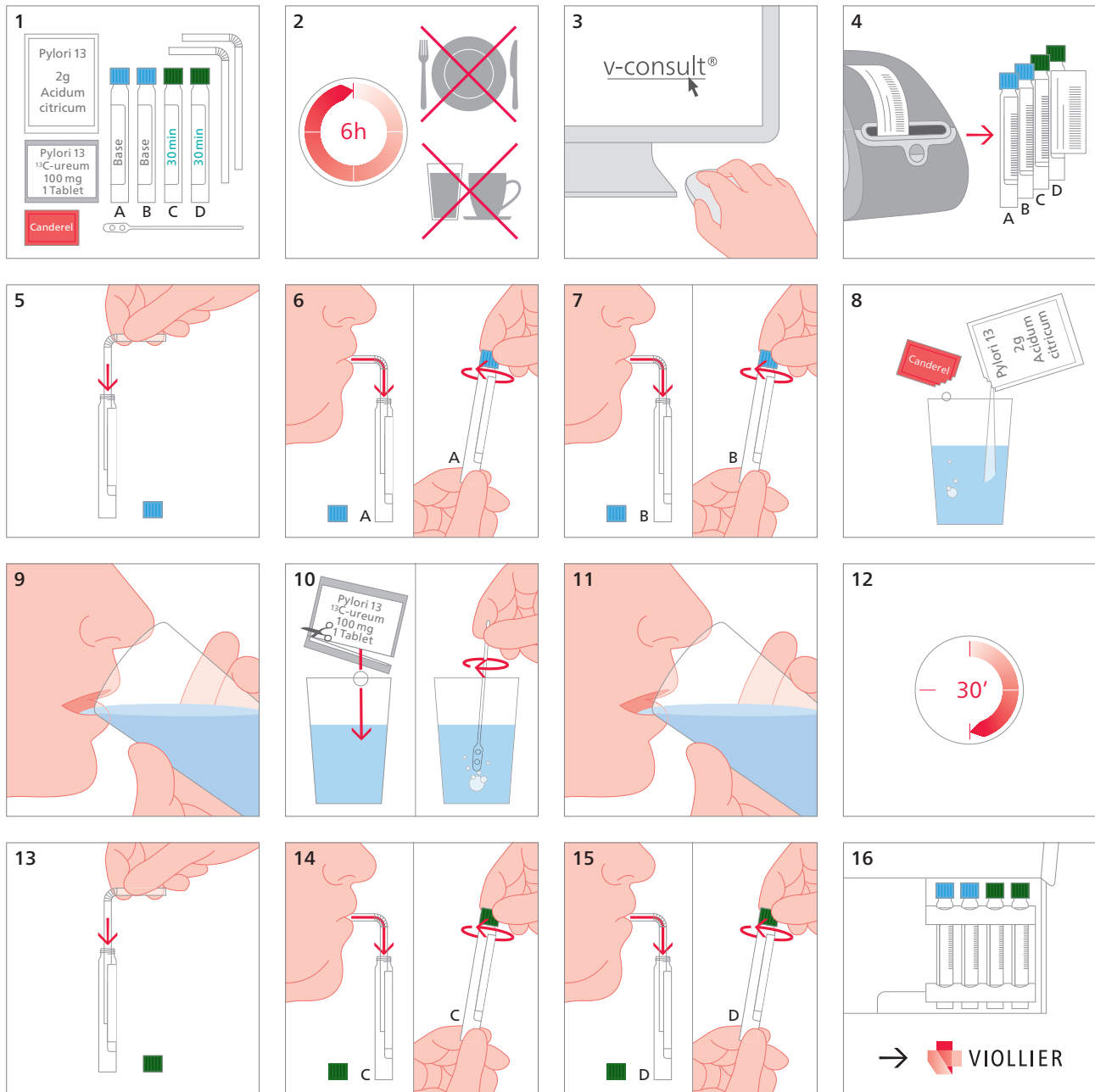

5 – 7 Tief einatmen, Atemluft langsam und **vollständig (Restluft)** durch den Trinkhalm in die zwei Tubes mit blauem Deckel (A und B) blasen; jeweils sofort verschliessen

8 – 9 2 g Zitronensäure (wenn gewünscht auch die Süsstofftabletten) in 100 mL H₂O auflösen und **vollständig** trinken

10 – 11 Die Harnstoff Tablette (Urea ¹³C Tablett) in 100 mL H₂O auflösen und dann **vollständig** trinken

12 **30 min warten**

13 – 15 Tief einatmen, Atemluft langsam und **vollständig (Restluft)** durch den Trinkhalm in die zwei Tubes mit grünem Deckel (C und D) blasen; jeweils sofort verschliessen

Versandmaterial:

Bitte mit Namen, Vornamen und Geburtsdatum des Patienten beschriften