


Test respiratorio con ^{13}C – Helicobacter pylori

Set test respiratorio ^{13}C (56)

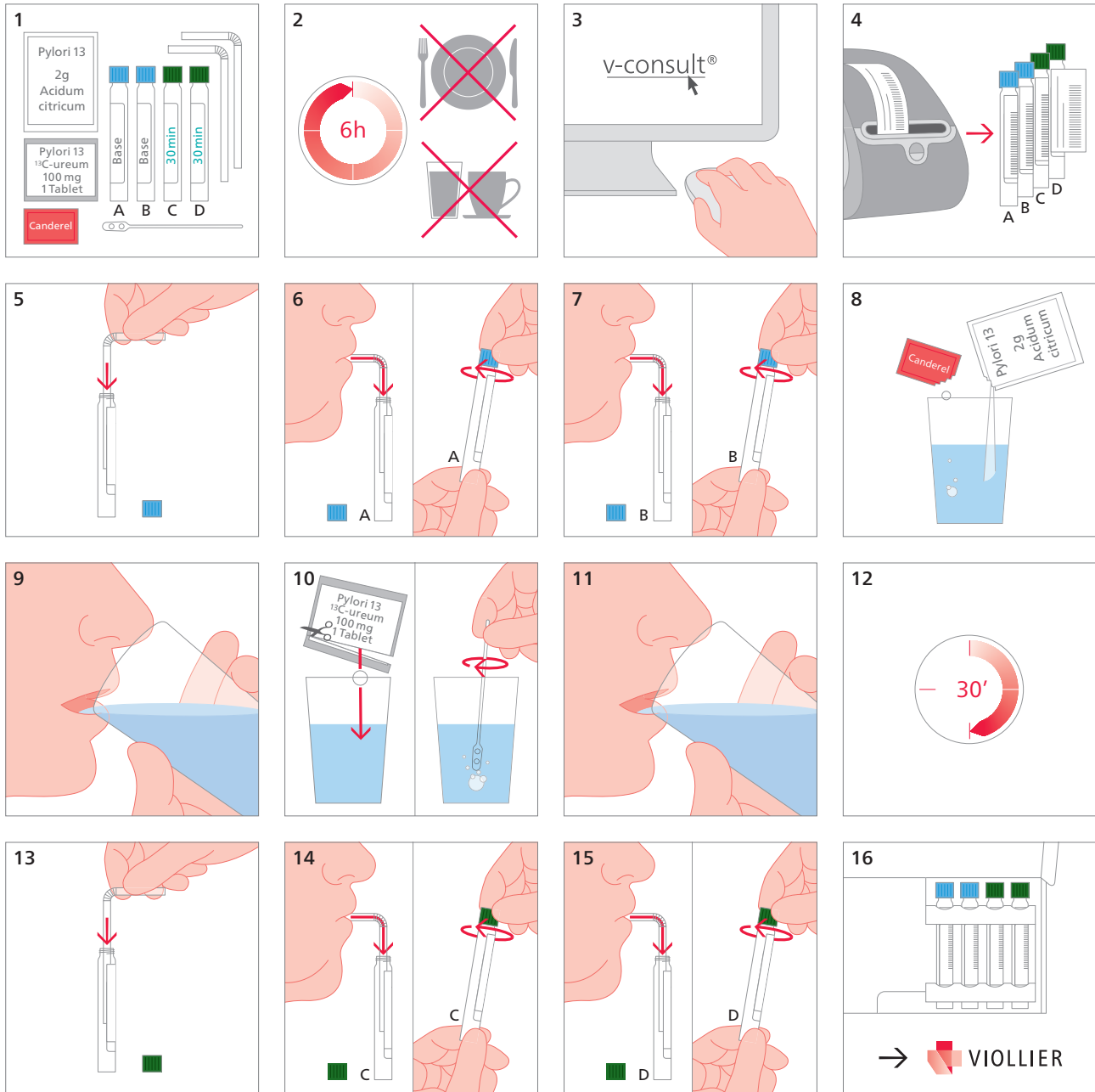

- 5 – 7 Inspirare profondamente, espirare lentamente e **completamente (aria residua)** nelle provette con tappo celeste (A e B) mediante la cannucina; chiudere immediatamente
- 8 – 9 Dissolvere 2 g di acido citrico (se desiderato anche le compresse di dolcificante) in 100 mL di H_2O e bere **completamente**
- 10 – 11 Dissolvere la compressa di urea (urea ^{13}C tablet) in 100 mL di H_2O e bere **completamente**
- 12 **Attendere 30 min**
- 13 – 15 Inspirare profondamente, espirare lentamente e **completamente (aria residua)** nelle provette con tappo verde (C e D) mediante la cannucina; chiudere immediatamente

Materiale di spedizione:

Indicare cognome, nome e data di nascita del paziente