

MODE D'EMPLOI



Pulsoxymétrie
nocturne



VIOLLIER

Informations importantes

Ne pas faire d'essai de mise en marche → l'appareil ne peut alors plus être éteint.

- Enlever le vernis à ongles ou les faux ongles avant l'examen.
- Ne pas placer le capteur de saturation en oxygène à l'extrémité du même bras que celui portant un brassard de tensiomètre de 24h, si ce dernier est porté en même temps.
- Mettre l'appareil en place avant d'aller au lit et le démarrer.
- Durée maximale de l'enregistrement : 8 heures. Convient aux patients à partir de 20 kg.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un CT, d'un IRM ou d'une source de rayons X.
- Les téléphones portables, les sources électromagnétiques puissantes et les couvertures chauffantes électriques peuvent influencer la qualité de l'enregistrement.

Carnet du patient

Veillez attirer l'attention du patient sur l'importance diagnostique d'un carnet du patient entièrement et correctement rempli.

Veillez utiliser un stylo à bille noir, et non pas un crayon.
Noter le début et la fin de l'enregistrement en précisant la date et l'heure.

Identification et analyse


- Coordonnées du patient
- Date et heure exacte du début de l'enregistrement notées par vos soins
- Numéro de l'appareil et du capteur digital inscrits par Viollier sur le formulaire de demande d'analyses

N° de l'appareil 010

N° du capteur digital 015



Veillez utiliser uniquement le formulaire de demande d'analyses joint, sur lequel figure déjà votre adresse.

Mise en place de l'appareil

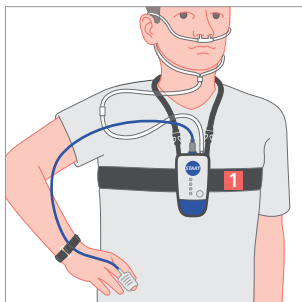


Mettre l'appareil en place avant d'aller au lit

- Ne pas porter l'appareil et la ceinture pectorale directement sur la peau.
- Passer la sangle nucale ainsi que l'appareil par-dessus la tête.
- Fixer l'appareil avec la ceinture pectorale **1** au milieu du sternum, à hauteur des mamelons chez les hommes et chez les femmes, à hauteur de la partie supérieure de la poitrine.
- Serrer fermement la ceinture, en prenant soin de ne pas entraver la respiration.
- Placer le capteur nasal sous le nez. Placer l'ouverture **2** dans les narines.
- Passer le câble derrière les oreilles, serrer le curseur du câble **3** sous le menton et l'ajuster.

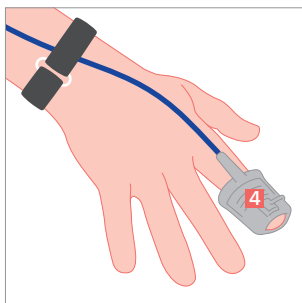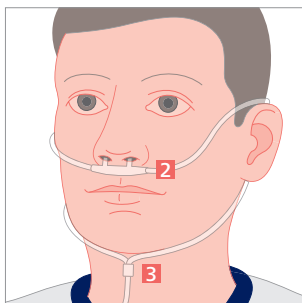


Fixer le capteur digital

- Enfiler le capteur de saturation en oxygène sur un doigt, le symbole 'ongle' tourné vers le haut. Faire glisser le capteur digital sur le doigt jusqu'à ce que le bout du doigt soit visible → le capteur digital **4** peut être changé de doigt durant la nuit.
- Doigts appropriés : index, majeur ou annulaire (sans vernis à ongles).
- Fixer le câble du capteur au poignet à l'aide de la bande velcro.

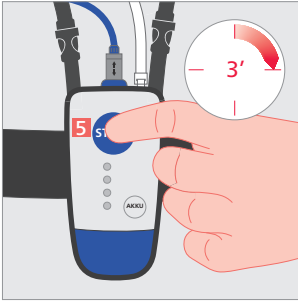

Démarrer l'appareil

- Maintenir enfoncée pendant 3 secondes la touche **bleue** à l'avant. **5**
- Durant l'enregistrement, la lumière **verte** **6** clignote toutes les quatre secondes. Si une lumière **rouge** apparaît **7**, cela signifie que le capteur digital n'est pas correctement positionné → veuillez le remettre en place.
- Si le capteur digital / le capteur nasal se détache la nuit, veuillez le remettre en place.

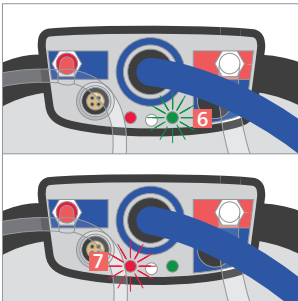

- Le lendemain matin, enlever et renvoyer l'appareil.
L'appareil s'arrête automatiquement après 8 heures.

→  VIOLLIER



Accessoires

- Appareil avec pochette et sangle nucale réglable
- Ceinture pectorale réglable (longue) et bande velcro (courte) pour la fixation au poignet
- Capteur de saturation en oxygène avec câble de raccordement inséré
- Capteur nasal avec câble de raccordement inséré
- Formulaire de demande d'analyses, carnet du patient et mode d'emploi
- Clip de fermeture rouge pour le renvoi

Renvoi

Une fois les enregistrements terminés, veuillez nous renvoyer l'appareil sans avoir débranché les câbles, la sangle, la ceinture, la bande velcro, le capteur de saturation en oxygène ainsi que le formulaire de demande d'analyses et le carnet du patient.

- via le Service clientèle
- via la poste

Pour le renvoi du coffret, veuillez :

- Retirer l'étiquette de la fenêtre transparente et la retourner → **l'adresse Viollier AG est visible**
- Insérer à nouveau l'étiquette dans la fenêtre transparente
- Fermer le coffret avec le clip de fermeture rouge
- Viollier prend en charge les frais de port



