

#### Accessori

- Apparecchio con 3 cavi e carta chip inserita
- Batteria
- Custodia igienica con cinghia per il collo e il petto
- Elettrodi autoadesivi
- Formulario di richiesta, diario del paziente e istruzioni
- Clip di chiusura rosso per la rispedizione

# Rispedizione

A registrazione terminata voglia rispedire l'apparecchio

con batteria sempre inserita, carta chip, formulario di richiesta e diario del paziente.

- tramite Servizio clientela
- per posta

Per la rispedizione della valigetta voglia:

- Estrarre l'etichetta dal campo visivo e girarla
- → compare l'indirizzo Viollier AG
- Reinserire l'etichetta nel campo visivo
- Chiudere la valigietta con il clip di chiusura rosso
- Affrancatura a carico di Viollier







# Informazioni importanti

Collegare l'apparecchio e la batteria solo sul paziente. La registrazione inizia appena la batteria è inserita nell'apparecchio.

- A registrazione terminata rispedire l'apparecchio assemblato.
- Adatto per pazienti a partire da 10 kg.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a TAC, MRI e apparecchiature radiologiche.
- Telefoni cellulari, forti fonti elettromagnetiche e termocoperte elettriche possono influenzare la qualità della registrazione.



### Diario del paziente

Informi il paziente sull'importanza diagnostica di compilare correttamente e completamente il diario del paziente. Si prega di utilizzare una penna a sfera nera, non una matita.

Annotare l'inizio e la fine della registra-

zione con data e ora.

Indicare la data e l'ora di disturbi, attività straordinarie, assunzione di farmaci e fasi di sonno.

#### Identificazione e analisi

- Generalità del paziente
- La data da lei riportata e l'esatta ora d'inizio della registrazione
- Il numero d'apparecchio, del chip e della batteria indicato da Viollier nel formulario di richiesta

No. apparecchio	006	No. manicotto	
No. chip	659	No. batteria	010


Voglia utilizzare esclusivamente l'allegato formulario di richiesta già provvisto del suo indirizzo.

# Applicazione dell'apparecchio




# Avvio dell'apparecchio

- Sgrassare la pelle con etanolo 70% e radere i peli per garantire la perfetta aderenza degli elettrodi.
- Spingere fortemente assieme l'apparecchio e la batteria, chiusura a scatto udibile.
- Al di sotto del tasto episodi appare dapprima brevemente una luce verde che lampeggia velocemente, quindi una luce rossa e poi una luce verde che lampeggia lentamente. L'apparecchio é pronto per la registrazione.
- Infilare il cavo verde attraverso il forellino nella parte inferiore della custodia igienica 4 e spingere l'apparecchio nella custodia.

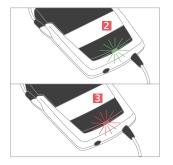

## Montaggio dell'apparecchio

- Fissare la custodia igienica contenente l'apparecchio attorno al collo → il tasto episodi grigio scuro 1 va direzionato in avanti.
- Posizionare gli elettrodi autoadesivi come da illustrazione.
- Collegare i cavi secondo i rispettivi colori:
- rosso verde giallo

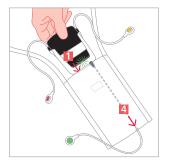


### Controllo della modalità di registrazione

Luce verde: registrazione garantita

**Luce rossa**: registrazione terminata, smontare e rispedire l'apparecchio.

La registrazione termina automaticamente dopo 24 ore.

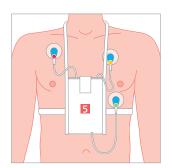

Indossare la custodia igienica contenente l'apparecchio 5 con la cinghia intorno al collo e fissarla intorno al petto.

