



### Zubehör

- Gerät mit eingestecktem Kabel, Chipkarte und eingelegten Batterien
- Hygienetasche mit Bauchgurt
- Selbstklebeelektroden
- Auftragsformular, Patientenprotokoll und Anleitung
- Roter Verschlussclip für die Rücksendung

### Rücksendung

Bitte senden Sie uns nach Beendigung der Aufnahme das Gerät **mit eingestecktem Kabel**, Chipkarte, Auftragsformular und Patientenprotokoll zurück.


- per Kundendienst
- per Post

Bitte beachten Sie für die Rücksendung des Koffers:

- Etiketle aus Sichtfeld ziehen und wenden  
→ **Adresse Viollier AG wird sichtbar**
- Etiketle wieder in das Sichtfeld einschieben
- Koffer mit rotem Verschlussclip schliessen
- Viollier übernimmt die Frankatur



© by Viollier AG / 02.2023 / 6099

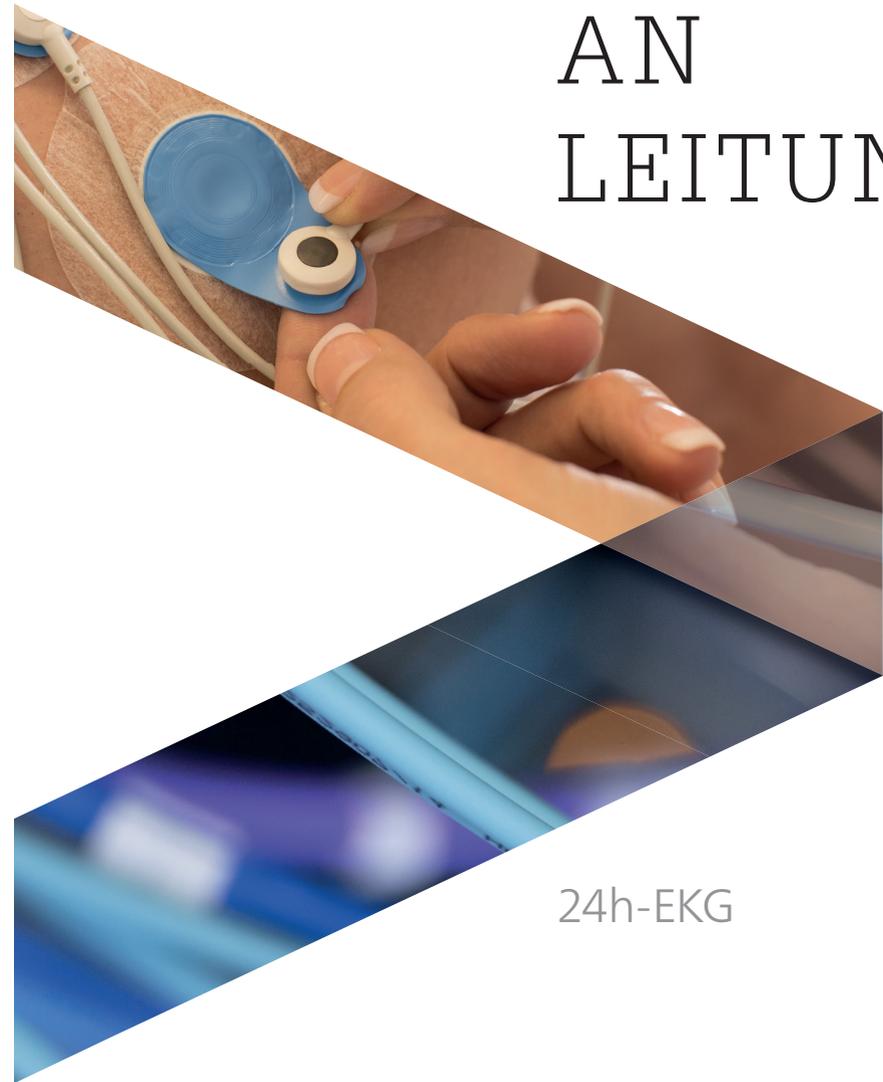

# ANLEITUNG

24h-EKG

# Wichtige Informationen

Gerät erst am Patienten starten. Keine Testmessungen im Voraus durchführen  
 → Gerät kann kein zweites Mal gestartet werden.

- Das Gerät funktioniert auch, wenn das blau blinkende Licht erlischt. Das blaue Licht hat für die Aufzeichnung keine Bedeutung.
- Drücken auf den gelben Knopf während der Aufzeichnung löst einen Piepston aus und ändert die Aufzeichnung nicht.
- Ein Piepston ertönt, wenn die Chipkarte während der Aufzeichnung herausfällt  
 → Die Karte wieder einlegen.
- Gerät vor der Abnahme der Elektroden ausschalten.
- Batterien im Gerät belassen, nicht entfernen.
- Mobiltelefone und starke elektromagnetische Quellen können die Qualität der Aufzeichnung beeinflussen.

**Patientenprotokoll Kardiologie**  
 Carnet du patient Cardiologie  
 Diario del paziente Cardiologia

## Patientenprotokoll

Bitte informieren Sie den Patienten über die diagnostische Wichtigkeit, das Patientenprotokoll korrekt und vollständig auszufüllen.

Bitte einen schwarzen Kugelschreiber verwenden, keinen Bleistift.

Start und Ende der Registrierung mit Datum und Zeit notieren.

Datum und Zeit von Beschwerden, aussergewöhnlichen Aktivitäten, Medikamenten und Schlafphase eintragen.

**Kardiologie – Pneumologie**





## Identifikation und Analyse

- Personalien des Patienten
- Das von Ihnen eingetragene Datum und die genaue Startzeit der Aufnahme
- Die von Viollier eingetragene Geräte- und Chipnummer auf dem Auftragsformular

Geräte-Nr.	022
Chip-Nr.	012

Bitte benutzen Sie ausschliesslich das beigelegte Auftragsformular, das bereits mit Ihrer Adresse versehen ist.

# Anlegen des Gerätes

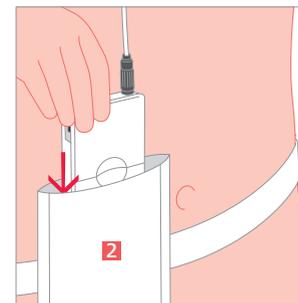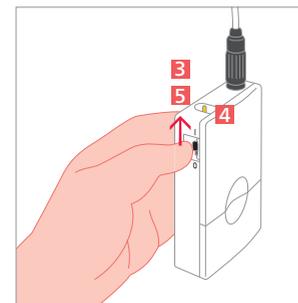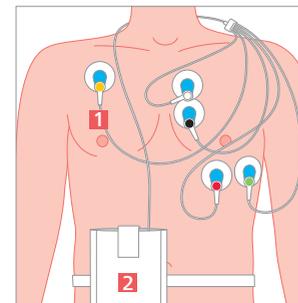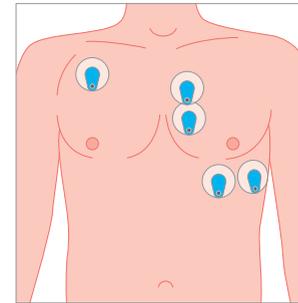

## Gerät montieren

- Haut mit Ethanol 70% entfetten und Haare rasieren, damit die Elektroden optimal kleben.
- Selbstklebeelektroden gemäss Abbildung positionieren.
- Kabel mit den entsprechenden Farben gemäss Abbildung anschliessen:  
 ● gelb  
 ○ weiss  
 ● schwarz  
 ● rot  
 ● grün
- Kabel um den Nacken legen und an der rechten Körperseite nach unten führen → Kabel nicht verkleben **1**.
- Gerät **2** in der Hygienetasche mit Gurt um den Bauch tragen.

## Gerät starten

- Schwarzen Schiebescalter **3** auf Position I schieben  
 → Gerät nicht mehr ausschalten.
- Aufnahme starten: Während 10 Sekunden den gelben Knopf gedrückt halten **4** bis ein 3-er Piepston den Start bestätigt.
- Nach 24 Stunden das Gerät ausschalten (Position 0) **5**, demontieren und zurücksenden.