



Accessori

- Apparecchio con cavo, carta chip e batterie inserite
- Custodia igienica con cintura addominale
- Elettrodi autoadesivi
- Formulario di richiesta, diario del paziente e istruzioni
- Clip di chiusura rosso per la rispedizione

Rispedizione

A registrazione terminata voglia rispedito l'apparecchio **con cavi inseriti**, carta chip, formulario di richiesta e diario del paziente.

- tramite Servizio clientela
- per posta

Per la rispedizione della valigetta voglia:

- Estrarre l'etichetta dal campo visivo e girarla
→ **compare l'indirizzo Viollier AG**
- Reinserrire l'etichetta nel campo visivo
- Chiudere la valigetta con il clip di chiusura rosso
- Affrancatura a carico di Viollier



© by Viollier AG / 02.2023 / 6101



ISTRUZIONI

ECG delle 24h



Informazioni importanti

Avviare solo dopo montaggio al paziente. Non effettuare misurazioni di prova → l'apparecchio non può essere avviato una seconda volta.

- L'apparecchio funziona anche se la luce blu lampeggiante si spegne. La luce blu non ha nessun importanza per la registrazione
- Una pressione sul bottone giallo durante la registrazione genera un segnale acustico e non causa alcun cambiamento della registrazione.
- Se, durante la registrazione, la carta chip fuoriuscisse dall'apparecchio suona un bip → In tal caso reinserire la carta chip.
- Spegnerne l'apparecchio prima di staccare gli elettrodi.
- Lasciare le batterie nel registratore, non rimuoverle.
- Telefoni cellulari e forti fonti elettromagnetiche possono influenzare la qualità della registrazione.

Diario del paziente

Informi il paziente sull'importanza diagnostica di compilare correttamente e completamente il diario del paziente.

Si prega di utilizzare una penna a sfera nera, non una matita.

Annotare l'inizio e la fine della registrazione con data e ora.

Indicare la data e l'ora di disturbi, attività straordinarie, assunzione di farmaci e fasi di sonno.





Identificazione e analisi

- Generalità del paziente
- La data da lei riportata e l'esatta ora d'inizio della registrazione
- Il numero d'apparecchio e di chip indicato da Viollier nel formulario di richiesta

No. apparecchio	022
No. chip	012

Voglia utilizzare esclusivamente l'allegato formulario di richiesta già provvisto del suo indirizzo.

Applicazione dell'apparecchio

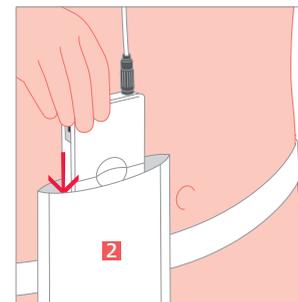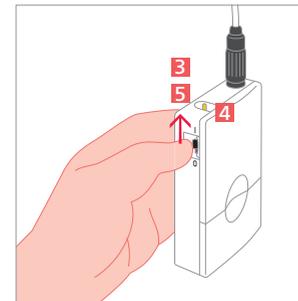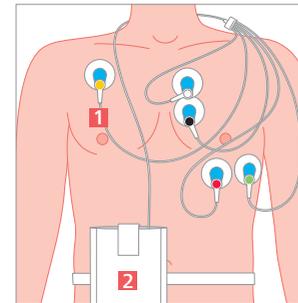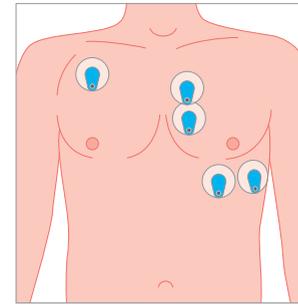

Montaggio dell'apparecchio

- Sgrassare la pelle con etanolo 70% e radere i peli per garantire la perfetta aderenza degli elettrodi.
- Posizionare gli elettrodi autoadesivi come da illustrazione.
- Collegare i cavi secondo i rispettivi colori come da illustrazione:
 - giallo
 - bianco
 - nero
 - rosso
 - verde
- Far passare il cavo intorno alla nuca e condurlo verso il basso lungo il lato destro del corpo → non fissare il cavo e il manicotto con adesivi 1.
- Indossare l'apparecchio 2 nella custodia igienica con la cinghia intorno all'addome.

Avviare l'apparecchio

- Spostare sulla posizione I l'interruttore nero 3 → non spegnere più l'apparecchio.
- Avviare la registrazione: premere per 10 secondi il tasto giallo 4 fino a che l'avvio venga confermato da 3 bip.
- Dopo 24 ore spegnere (posizione 0) 5, smontare e rispedito l'apparecchio.