

Accessoires

- Appareil avec brassard connecté et piles incorporées
- Etui de protection avec ceinture abdominale
- Manchon textile pour le haut du bras
- Formulaire de demande d'analyses, carnet du patient et mode d'emploi
- Clip de fermeture rouge pour le renvoi

Renvoi


Une fois l'enregistrement terminé, veuillez nous renvoyer l'appareil, avec le brassard encore connecté, le formulaire de demande d'analyses et le carnet du patient.

- via le Service clientèle
- via la poste

Pour le renvoi du coffret, veuillez :

- Retirer l'étiquette de la fenêtre transparente et la retourner → adresse Viollier AG est visible
- Insérer à nouveau l'étiquette dans la fenêtre transparente
- Fermer le coffret avec le clip de fermeture rouge
- Viollier prend en charge les frais de port



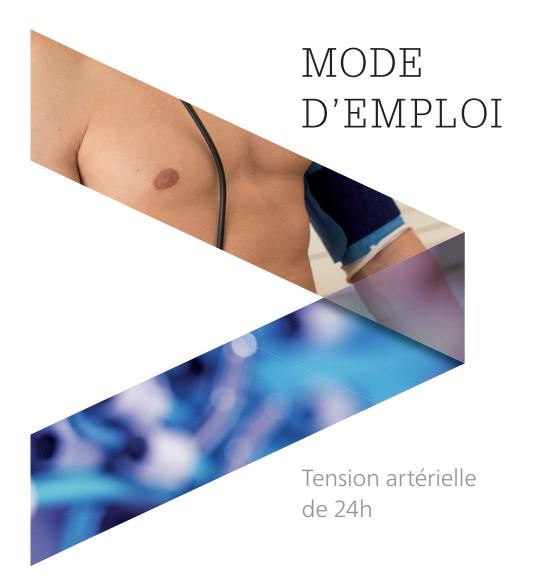




Informations importantes

Ne pas mettre l'appareil en marche tant qu'il n'a pas été mis en place sur le patient. Ne pas effectuer de mesures test au préalable → l'appareil ne peut pas être remis en marche.

- Commander la taille appropriée de brassard chez Viollier : 20 24 cm = taille Enfant | 24 32 cm = taille Standard | 32 40 cm = taille XL | 38 50 cm = taille XXL
- L'intervalle de mesure de l'appareil est pré-programmé : toutes les 15 min à partir de 06:00 h, toutes les 30 min à partir de 22:00 h. En cas de mesures erronées ou de valeurs nettement trop élevées, une nouvelle mesure se déclenche automatiquement après 2 min.
- Pour éviter de fausses mesures, laisser le bras immobile pendre le long du corps pendant la mesure de la tension artérielle.
- Laisser les piles dans l'appareil, ne pas les retirer.
- Les téléphones portables et les sources électromagnétiques puissantes peuvent influencer la qualité de l'enregistrement.



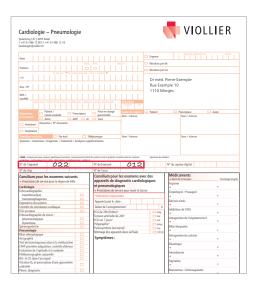

Carnet du patient

Veuillez attirer l'attention du patient sur l'importance diagnostique d'un carnet de patient correctement et entièrement rempli.

Veuillez utiliser un stylo à bille noir, et non pas un crayon.

Noter le début et la fin de l'enregistrement en précisant la date et l'heure.

Inscrire la date et l'heure des symptômes, des activités inhabituelles, de la prise de médicaments et des phases de sommeil.

Identification et analyse

- Coordonnées du patient
- Date et heure exacte du début de l'enregistrement notées par vos soins
- Numéro de l'appareil et du brassard inscrits par Viollier sur le formulaire de demande d'analyses

N° de l'appareil	022	N° du brassard	012
ii aa i apparan	V 54,54		012


Veuillez utiliser uniquement le formulaire de demande d'analyses joint, sur lequel figure déjà votre adresse.

Mise en place de l'appareil



Pose de l'appareil

- Enfiler le manchon textile 1 sur le bras gauche.
- Poser le brassard 2 par-dessus le manchon textile et bien serrer
- La marque **3** doit être sur la face interne (artère) du bras.
- Faire passer le tuyau à air 4 derrière la nuque puis le long du côté droit du corps → ne pas fixer le brassard et le tuyau à air à l'aide de ruban adhésif.

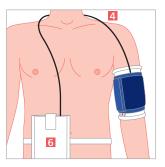

Démarrage de l'appareil

- Mettre l'interrupteur noir sur position I → ne plus éteindre l'appareil.
- Placer l'appareil dans l'étui de protection et le fixer avec la ceinture autour du ventre.
- Eteindre l'appareil au bout de 24 heures (position 0) 8, l'enlever et le renvoyer.

