



#### Aksesuar

- Çantalı ve ayarlanabilir boyun askılı cihaz
- Bileğe sabitlemek için ayarlanabilir göğüs ve karın kemeri (uzun) ayrıca cırt cırt (kısa)
- Takılı bağlantı kabloları ile birlikte oksijenle besleme sensörü (entegre göğüs ve karın sensörlü)
- Takılı kablo ile birlikte burun sensörü
- Sipariş formu, hasta tutanağı ve kullanma talimatı
- Geri göndermek için kırmızı kapatma klips

#### Geri gönderme

Lütfen kaydınızı tamamladıktan sonra takılı kabloları, kemerler, cırtcirtlar, göğüs ve karın sensörü, oksijen besleme sensörü, sipariş formu ve hasta tutanağı ile birlikte cihazı geri gönderin. Viollier kargo masraflarını karşılamaktadır.

- Müşteri hizmetleri üzerinden – muayenehanede teslimat
- DPD üzerinden – parcelshop teslim alma noktasına teslimat  
→ [dpgroup.com/ch/mydpd/parcel-shops](https://dpgroup.com/ch/mydpd/parcel-shops)
- Posta yoluyla

Çantayı geri gönderirken lütfen aşağıdakileri dikkate alınız:

- Etiketleri görüş alanından sökün
- Uygun iade etiketini (kutunun içinde) görüş alanına kaydırın  
→ [Viollier AG adresi görünür](#)
- Çantayı kırmızı kilitleme klipsi ile kapatın

# KILAVUZ

Polygrafie  
(Nabız kaydetme)

# Önemli Bilgiler

Cihazı deneme amacıyla çalıştırmayınız → Cihaz tekrar kapatılamaz.

- Muayeneden önce oje veya sahte tırnakları çıkartınız.
- Oksijen besleme sensörünü, ve eşzamanlı olarak takılacak 24 saatlik tansiyon aletinin manşetini aynı uzva bağlamayınız.
- Cihazı yatağa yatmadan önce monte ediniz ve başlatınız.
- Kayıt süresi azami 8 saattir, 20 kg ve üzeri hastalar için uygundur.
- Cihazı CT, MRI ve röntgen yakınlarında kullanmayınız.
- Cep telefonları, güçlü elektromanyetik kaynaklar ve elektrikli battaniyeler kayıt kalitesini olumsuz etkileyebilir.

## Hasta tutanağı

Lütfen hastayı, hasta protokolünün eksiksiz ve doğru doldurulmasının teşhis açısından önemli olduğu konusunda bilgilendiriniz. Lütfen kurşun kalem yerine siyah tükenmez kalem kullanın. Kayıt başlangıcını ve bitişini tarih ve saatle birlikte not ediniz.





## Tanımlama ve analiz

- Hastanın kimlik bilgileri
- tarafınızca kaydedilmiş olan tarih ve kabulün tam başlama saati
- Viollier tarafından sipariş formuna kaydedilen cihaz ve parmak sensörü numarası

Geräte-Nr. 010 Fingersensor-Nr. 015

Lütfen sadece üzerinde adresinizin önceden yazılı olduğu birlikte verilmiş sipariş formunu kullanınız.

# Cihazın Bağlanması

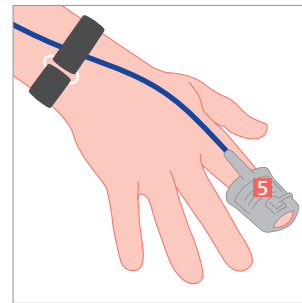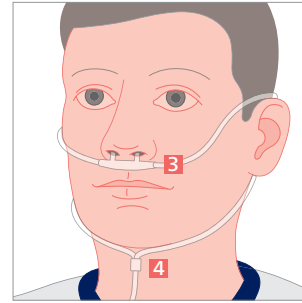
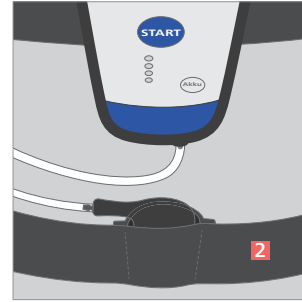
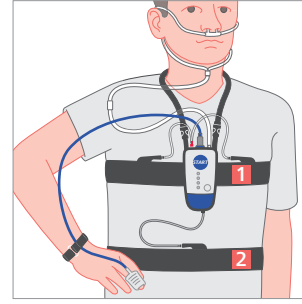


## Cihazı yatağa yatmadan önce monte ediniz

- Cihazı, göğüs ve karın kemerini doğrudan cildin üzerinde taşımayınız.
- Cihazla birlikte boyun askısını kafanızdan geçirin.
- Cihazı göğüs kemeri ile göğüs kemiği hizasında ortaya sabitleyiniz → erkeklerde meme ucu hizasına, kadınlarda göğüsün üst kısmına.
- Karın sensörlerini karın kemeriyle karının etrafından (göbek deliği yüksekliğinde) çekiniz. Basınç sensörü kemerin iç tarafında olmalıdır. Her iki kemeri iyice sıkınız, ancak bu solunumu engelleyecek kadar sıkı olmamalıdır.
- Burun sensörünü burnun altına yerleştiriniz. Deliği burun deliklerinin altına konumlandırınız.
- Kablo kulakların arkasından geçirin, kablo iticisini çenenin altından sıkınız.

## Parmak sensörünün sabitlenmesi

- Üzerinde el tırnağı sembolü olan oksijenle besleme sensörünü yukarıya parmağınızın ucuna takınız. Parmak sensörünü, parmak ucu görünene dek parmağın üzerine geçiriniz. Parmak sensörü gece esnasında başka bir parmağa takılabilir.
- Uygun olan parmaklar: İşaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağı (ojesiz).
- Sensör kablosunu cırt cırtla bileğe sabitleyiniz.

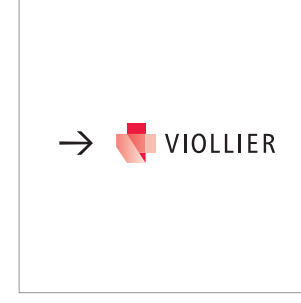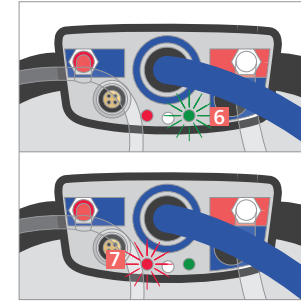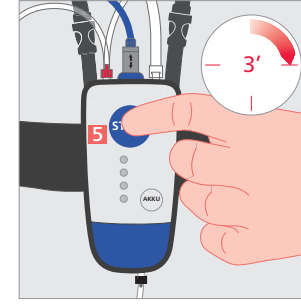

## Cihazın çalıştırılması

- Ön mavi başlat tuşuna 3 saniye boyunca basınız.
- Kayıt sırasında yeşil ışık dört saniyelik döngülerle yanar. Bunun yanı sıra kırmızı ışık belirirse parmak sensörü doğru konumlandırılmamıştır → lütfen düzeltiniz.
- Parmak sensörünün / burun sensörünün gece yerinden çıkması durumunda, lütfen yeniden takın.

→ Sabah cihazı çıkartınız, kabloları takılı bırakınız ve cihazı geri gönderiniz. Cihaz 8 saat sonra otomatik olarak kapanmaktadır.