

Zubehör

- Gerät mit 4 Kabeln
- Selbstklebeelektroden
- Auftragsformular, Patiententagebuch und Anleitung
- Roter Verschlussclip für die Rücksendung

Rücksendung

Bitte senden Sie uns nach Beendigung der Aufnahme das Gerät, Auftragsformular und Patiententagebuch zurück. Die Versandkosten übernimmt Viollier.


- Per Kundendienst – Abgabe in der Praxis
- Per DPD – Abgabe an einem Pickup parcelshop → dpgroup.com/ch/mydpd/parcel-shops
- Per Post

Bitte beachten Sie für die Rücksendung des Koffers:

- Etiketle aus Sichtfeld entfernen
- Entsprechende Retourenetikette (im Koffer) in das Sichtfeld schieben
→ Adresse Viollier AG wird sichtbar
- Koffer mit rotem Verschlussclip schliessen

Herz-Lungen-Praxis | Spalenring 147 | 4055 Basel | T +41 848 121 121 | viollier.ch
Montag – Freitag 07:30 – 18:00 h

© by Viollier AG / 01.2026 / 18590

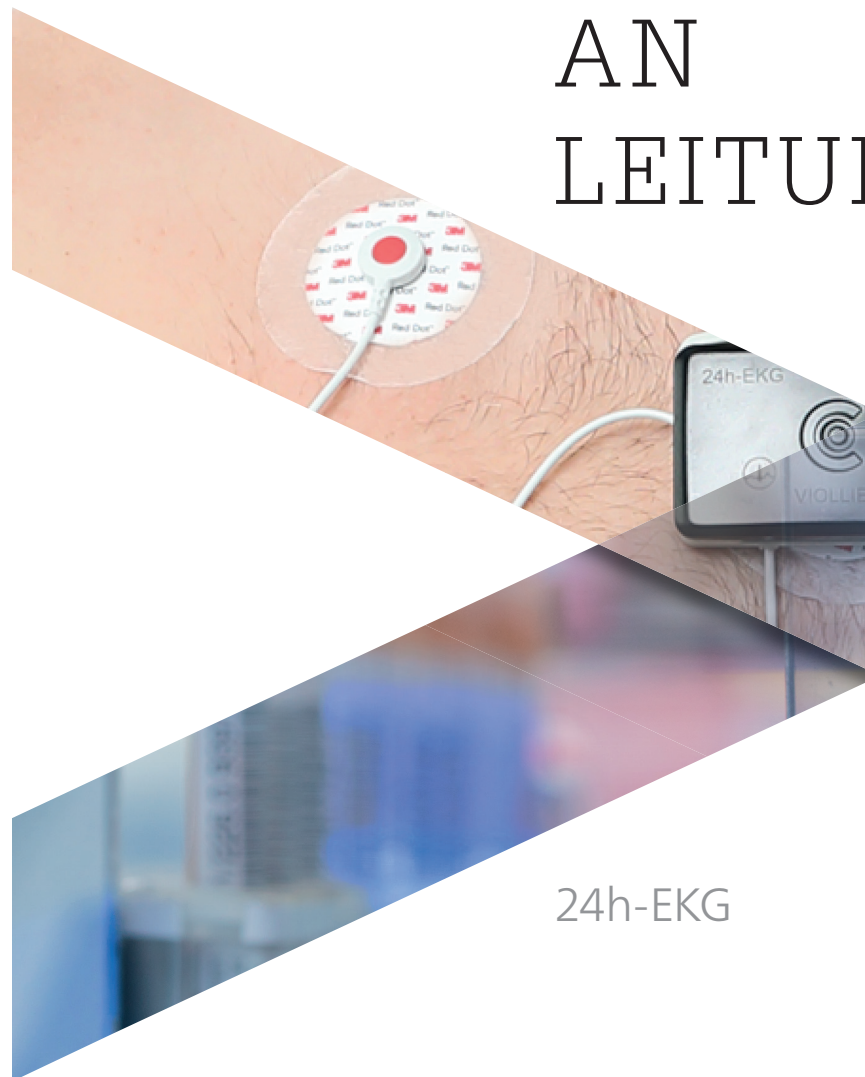

24h-EKG



Wichtige Informationen

Die Aufnahme beginnt innerhalb von 60 Sekunden, nachdem die Elektroden Hautkontakt haben.

- Geeignet für Patienten ab 10 kg
- Gerät nicht in der Nähe von CT, MRI und Röntgen einsetzen.
- Mobiltelefone, starke elektromagnetische Quellen und elektrische Heizdecken können die Qualität der Aufzeichnung beeinflussen.
- Das Tragen im Schwimmbad, in der Sauna, Badewanne, Dusche oder ähnlichen Feuchträumen ist verboten.

The image displays two pages of a 'Pensées' notebook by Viollier. The left page is the front cover, featuring the Viollier logo (a red stylized flower) and the title 'Pensées' in a large, elegant font. Below the title, it says '24-06-2024', '24-06-2024', and '24-06-2024'. The right page is the inside cover, which has a grid of dates from 2024 to 2025. The grid is divided into two columns: '2024' and '2025'. The dates are listed in a small font, and the grid is designed for users to write their thoughts or reflections. The notebook is bound in a dark, textured cover.

Patiententagebuch

Bitte informieren Sie den Patienten über die diagnostische Wichtigkeit, das Patiententagebuch korrekt und vollständig auszufüllen.

- Bitte einen schwarzen Kugelschreiber verwenden.
- Start und Ende der Registrierung mit Datum und Zeit notieren.
- Datum und Zeit von Beschwerden, aussergewöhnlichen Aktivitäten, Medikamenten und Schlafphasen eintragen.

[illegible]

Identifikation und Analyse

- Personalien des Patienten
- Das von Ihnen eingetragene Datum und die genaue Startzeit der Aufnahme
- Die von Viollier eingetragene Geräte-
nummer auf dem Auftragsformular

Geräte-Nr.	006	Manschetten-Nr.			
Chip-Nr.		Akku-Nr.			


Bitte benutzen Sie ausschliesslich das beigelegte Auftragsformular, das bereits mit Ihrer Adresse versehen ist.

Anlegen des Gerätes

Vorbereitung


- Haut mit Ethanol 70% entfetten und Haare rasieren, damit die Elektroden optimal kleben.
- Bringen Sie die Elektroden an den Kabelenden an.
- Bringen Sie eine Einmal-Klebeelektrode am Druckknopf-Kontakt auf der Rückseite des Gerätes an. **Bitte kein zusätzliches Pflaster oder Klebeband verwenden.**

Die Elektrode dient zur Fixierung des Gerätes an der Brust des Patienten. Bewegungsartefakte werden dadurch reduziert und die Qualität der Aufzeichnung verbessert. Diese Elektrode hat keine medizinische / diagnostische Funktion.

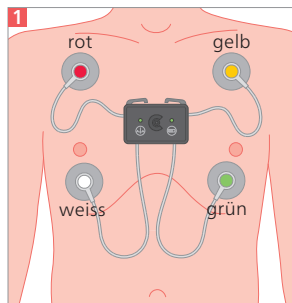



Gerät montieren

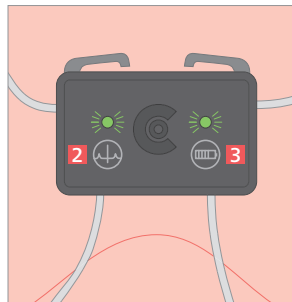- Selbstklebeelektroden gemäss Abbildung 1 am Brustkorb des Patienten positionieren:
 ● rot ● gelb ● grün ○ weiss
- Die Elektrode zur Fixierung fest am Rand an die Haut drücken.
- Das Gerät startet selbständig innerhalb von 60 Sekunden, nachdem die Elektroden Hautkontakt haben.



Aufzeichnungsmodus kontrollieren

- Das Symbol 'QRS-Komplex'  zeigt den Aufzeichnungsstatus an.
Grün blinkendes Licht: EKG-Aufzeichnung aktiv
- Das Symbol 'Batterie'  gibt Auskunft zum Ladestatus.
Grün blinkendes Licht: Akkuspannung ausreichend

Durch kräftiges Klopfen mit der flachen Hand auf das Gerät kann der Patient / die Patientin bei Beschwerden einen Marker setzen.