

Istruzione

Poligrafia

Diario del paziente

Informi il paziente sull'importanza diagnostica di compilare correttamente e completamente il diario del paziente.

- Si prega di utilizzare una penna a sfera nera, non una matita
- Annotare l'inizio e la fine della registrazione con data e ora

Identificazione e analisi

- Generalità del paziente
- La data da lei riportata e l'esatta ora d'inizio della registrazione
- Il numero d'apparecchio e di sensore da dito indicato da Viollier nel formulario di richiesta

No. apparecchio **010** No. sensore ditale **015**

Voglia utilizzare esclusivamente l'allegato formulario di richiesta già provvisto del suo indirizzo

- Per la prescrizione tramite v-consult®: stampare le etichette e incollarle su tutti i documenti

Rispedizioni

A termine della registrazione la preghiamo di volerci rispedire l'apparecchio con cavi inseriti, cinghie, velcro, sensore toracico e addominale, sensore della saturazione di ossigeno, formulario di richiesta e diario del paziente.

Le spese di spedizione sono a carico di Viollier.

- Tramite Servizio clientela – consegna allo studio medico
- Tramite DPD – consegna presso un Pickup parcelshop → dpgdgroup.com/ch/mydpd/parcel-shops
- Per posta


Per la rispedizione della valigetta voglia:

- Rimuovere l'etichetta dal campo visivo
- Far scorrere l'etichetta di restituzione appropriata (nella custodia) nel campo visivo
→ **l'indirizzo Viollier AG compare**
- Chiudere la valigetta con clip di chiusura rossa

Informazioni importanti

- **Non avviare l'apparecchio a titolo di prova. L'apparecchio non può più essere spento**
- Prima dell'esame rimuovere lo smalto, le unghie in gel o le applicazioni sulle unghie
- Non applicare il sensore della saturazione di ossigeno alla stessa estremità alla quale è applicato il manicotto dell'apparecchio di misurazione della pressione arteriosa delle 24h, nel caso di un utilizzo contemporaneo
- Applicare e avviare l'apparecchio prima di coricarsi
- Durata della registrazione max. 8 ore, adatto per pazienti a partire da 50 kg
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a TAC, MRI e apparecchiature radiologiche
- Telefoni cellulari, forti fonti elettromagnetiche e termocoperte elettriche possono influenzare la qualità della registrazione

Applicazione dell'apparecchio

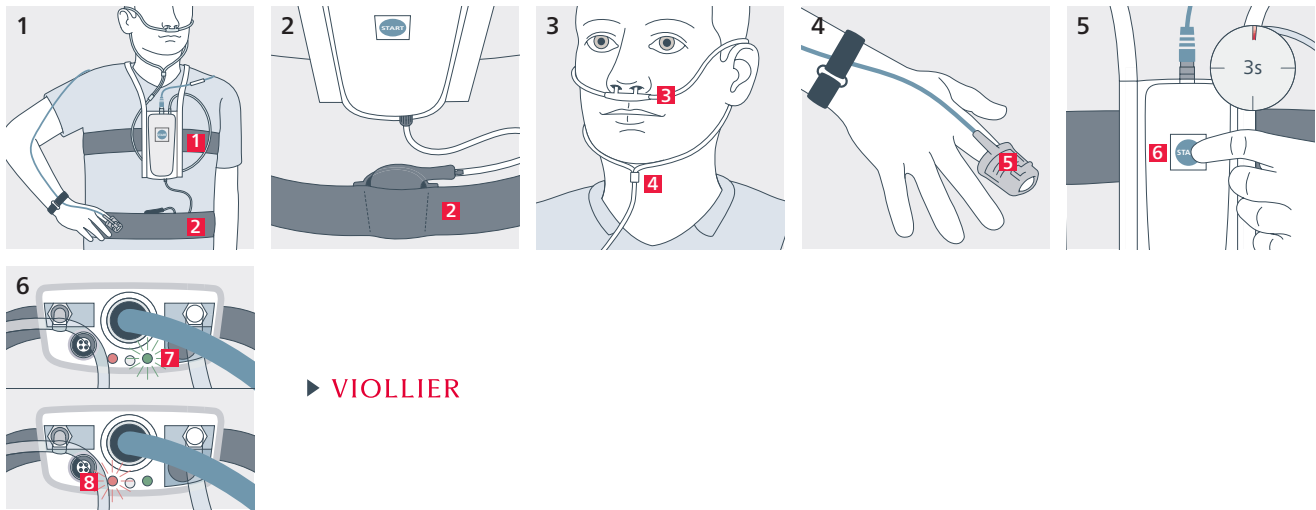

► VIOLLIER

1 – 3 Applicare l'apparecchio prima di coricarsi

- Apparecchio, cinghia del torace e cinghia addominale non vanno indossati direttamente sulla pelle
- Passare la cinghia da collo unitamente all'apparecchio sopra la testa
- Con l'ausilio della cinghia del torace **1** fissare l'apparecchio al centro all'altezza dello sterno
→ **per gli uomini all'altezza dei capezzoli, per le donne sulla zona superiore del seno**
- Fissare il sensore addominale tirando la cinghia addominale **2** attorno all'addome (all'altezza dell'ombelico). I sensori di pressione devono trovarsi sul lato interno della cinghia. Tirare entrambe le cinghie, tuttavia non così strette da limitare la respirazione
- Applicare il sensore nasale al di sotto del naso. Piazzare l'apertura **3** nelle narici
- Far passare il cavo dietro le orecchie, stringere il dispositivo di fissaggio del cavo **4** sotto al mento e adattarlo

4 Avviare l'apparecchio

- Applicare al dito il sensore di saturazione di ossigeno con il simbolo dell'unghia verso l'alto. Infilare il sensore da dito fino a quando è visibile il polpastrello
→ durante la notte è consentito spostare il sensore da un dito all'altro **5**
- **Sono adatti indice, medio e anulare (senza smalto, unghie in gel o applicazioni sulle unghie)**
- Fissare con il velcro il cavo del sensore al polso
- Nel caso il sensore da dito / sensore nasale dovesse staccarsi durante la notte, si prega di applicare nuovamente

5 – 6 Avviare l'apparecchio

- Tenere premuto il **tasto start anteriore blu 6** per 3 secondi
- Durante la registrazione, la **luce verde 7** lampeggia a intervalli di 4 secondi. Se accanto appare una **luce rossa 8**, il sensore del dito non è applicato correttamente → voglia per favore correggere
- Nel caso il sensore da dito / sensore nasale dovesse staccarsi durante la notte, si prega di applicare nuovamente
- La mattina smontare l'apparecchio e rispedirlo. **L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 8 ore**



Accessori

- Apparecchio con astuccio e cinghia da collo
- Cintura toracica e addominale regolabile (lunga) con due sensori integrati per il torace e un sensore addominale
- Sensore di saturazione di ossigeno con cavo di collegamento inserito e cinturino in velcro (corto) per il fissaggio al polso
- Sensore nasale con cavo di collegamento inserito
- Formulario di richiesta, diario del paziente e istruzioni
- Clip di chiusura rosso per la rispedizione