


Atemtest

¹³C Atemtest — Helicobacter pylori

¹³C Atemtest-Set (56)

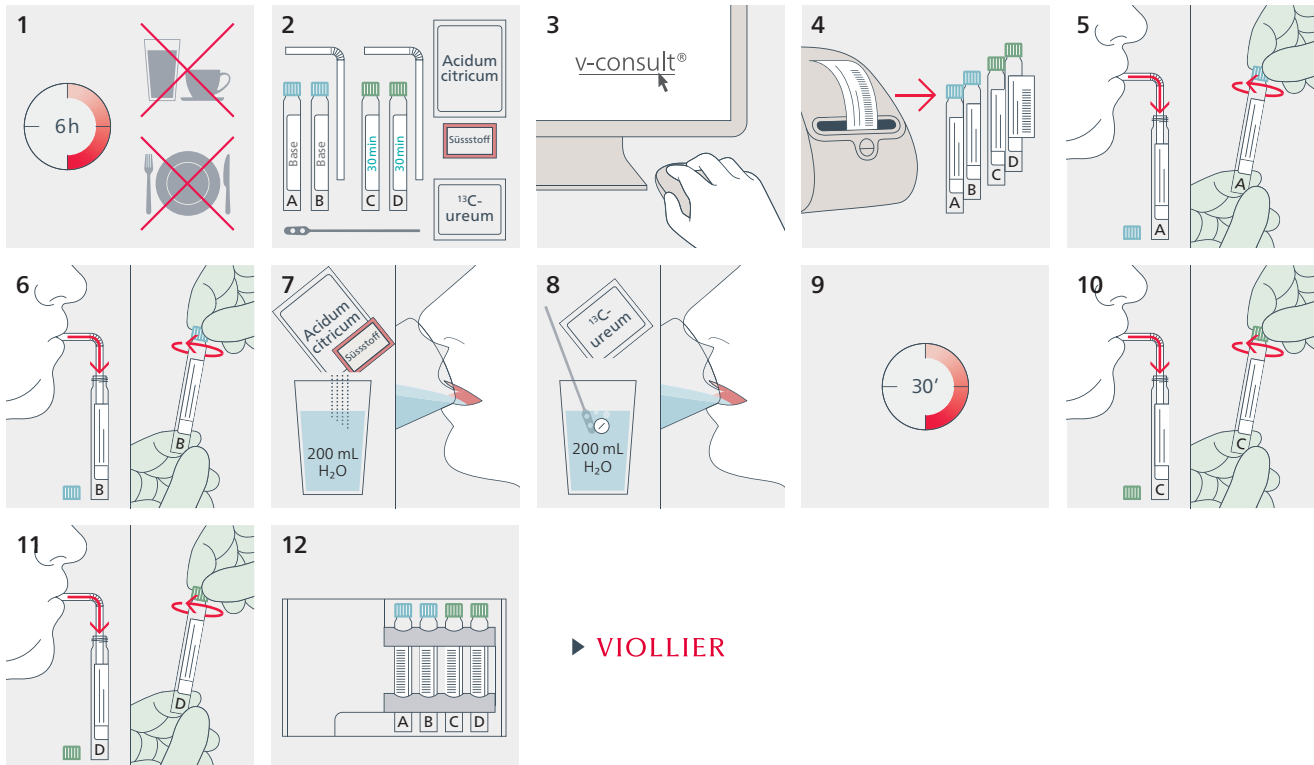

► VIOLLIER

- 5 – 6 Tief einatmen, Atemluft langsam und **vollständig (Restluft)** durch den Trinkhalm in die zwei Tubes mit blauem Deckel (A und B) blasen. Jeweils sofort verschliessen
- 7 2 g Zitronensäure (Acidum citricum, wenn gewünscht auch die Süsstofftabletten) in 100 mL H₂O auflösen und **vollständig** trinken
- 8 Die Harnstoff Tablette (¹³C-ureum) in 100 mL H₂O auflösen und dann **vollständig** trinken
- 9 **30 min warten**
- 10 – 11 Tief einatmen, Atemluft langsam und **vollständig (Restluft)** durch den Trinkhalm in die zwei Tubes mit grünem Deckel (C und D) blasen; jeweils sofort verschliessen