


Test respiratoire

Test respiratoire au ^{13}C — *Helicobacter pylori*

Kit test respiratoire ^{13}C (56)

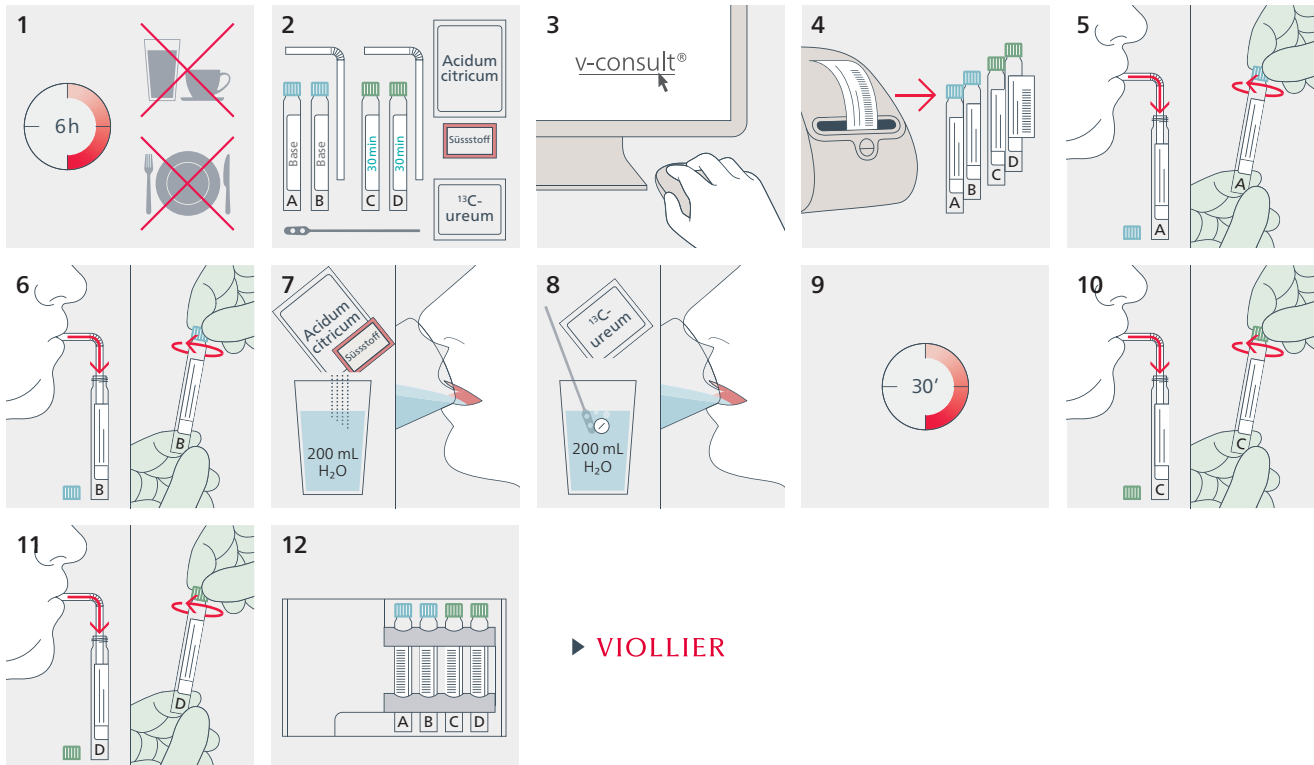

► VIOLLIER

- 5 – 6 Inspirer profondément et, à l'aide de la paille, expirer lentement et **entièrement l'air (air résiduel)** dans les deux tubes avec bouchon bleu (A et B), puis refermer immédiatement les tubes
- 7 Dissoudre 2 g d'acide citrique (Acidum citricum, et les tablettes d'édulcorant si souhaité) dans 100 mL H₂O et boire **tout le contenu**
- 8 Dissoudre la tablette 100 mg d'urée (^{13}C -ureum) dans 100 mL H₂O et boire **tout le contenu**
- 9 **Attendre 30 min**
- 10 – 11 Inspirer profondément et, à l'aide de la paille expirer lentement et **entièrement l'air (air résiduel)** dans les deux tubes avec bouchon vert (C et D), puis refermer immédiatement les tubes