


Test respiratorio

Test respiratorio H₂ / CH₄

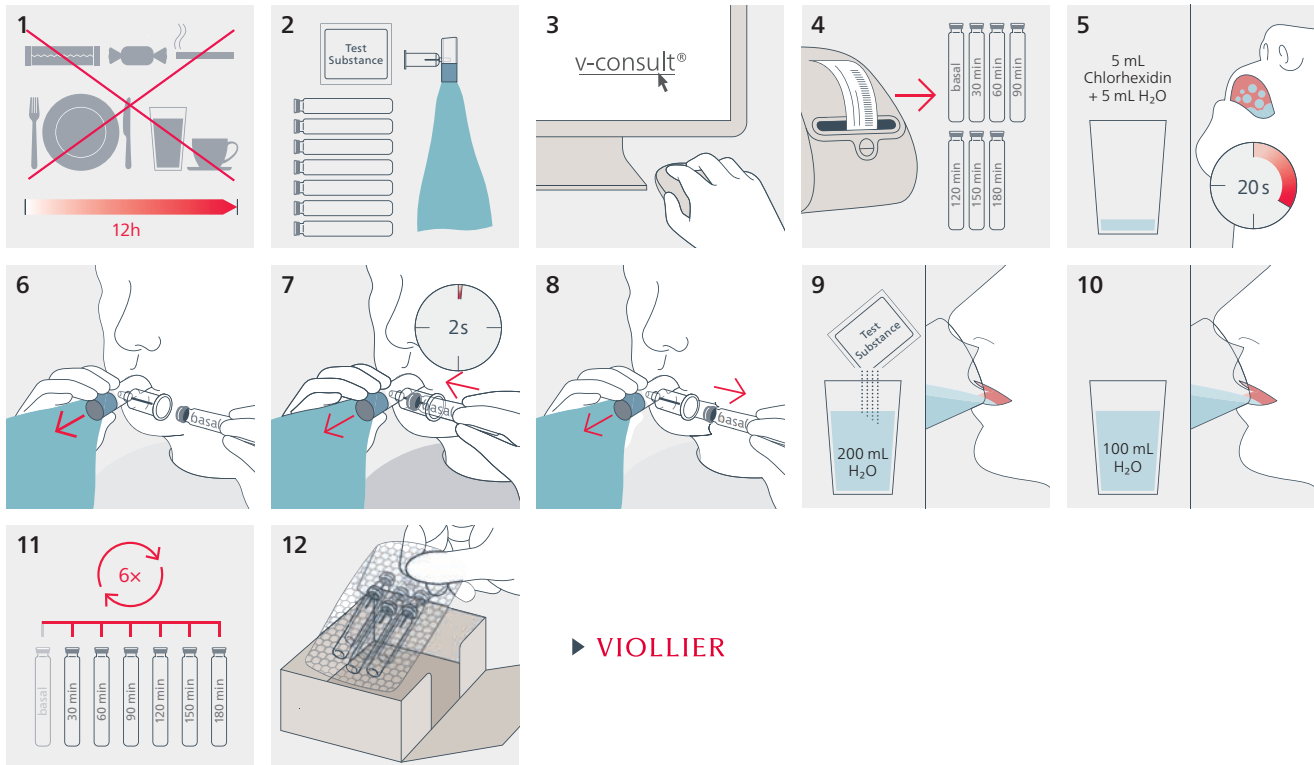

► VIOLLIER

- 5 **Prima della raccolta del primo campione d'aria espirata, sciacquare la bocca per 20 secondi con una miscela di 5 mL di soluzione di clorexidina 0,2% (p. es. Dentohexin®) e 5 mL di acqua**
- 6 **Inspirare 1 x normalmente** attraverso il naso, tenere il boccaglio saldamente con le labbra ed espirare uniformemente. Il sacchetto blu si riempie d'ari
- 7 – 8 **Durante l'espirazione, inserire la provetta per il campione basale nell'ago dell'adattatore e soffiare per altri 2 secondi. Staccare la provetta → Non interrompere l'espirazione finché la provetta non è stata staccata**
- 9 – 11 **Dopo l'assunzione della sostanza di test sciolta in 200 mL d'acqua e di ulteriori 100 mL d'acqua, eseguire la procedura (figure 6 – 8) 6 x dopo 30, 60, 90, 120, 150, 180 min**

- Durata del test circa 4h
- Per un peso corporeo ≤ 40 kg, regolare il sacchetto blu secondo la scala stampata. Arrotolare fino al livello appropriato e fissare con una pinzatrice / graffatrice
- Ulteriori informazioni → viollier.ch/H2_CH4_informazione