


Instruction

## Tension artérielle de 24h

### Carnet du patient

Veillez attirer l'attention du patient sur l'importance diagnostique d'un carnet de patient correctement et entièrement rempli.

- Veuillez utiliser un stylo à bille noir, et non pas un crayon
- Noter le début et la fin de l'enregistrement en précisant la date et l'heure
- Inscrire la date et l'heure des symptômes, des activités inhabituelles, de la prise de médicaments et des phases de sommeil

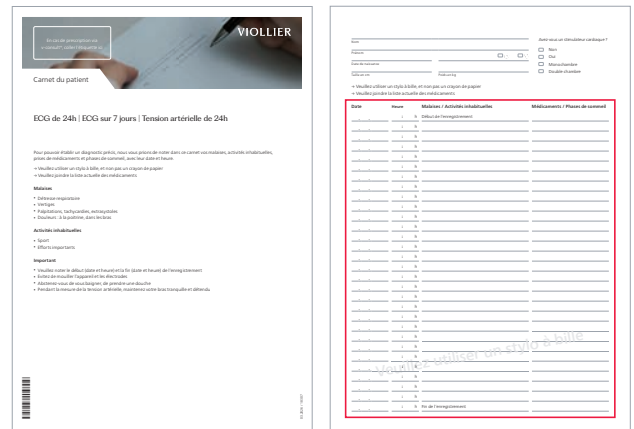

### Identification et analyse

- Coordonnées du patient
- Date et heure exacte du début de l'enregistrement notées par vos soins
- Numéro de l'appareil et du brassard inscrits par Viollier sur le formulaire de demande d'analyses

N° de l'appareil **022** N° du brassard **012**

Veillez utiliser uniquement le formulaire de demande d'analyses joint, sur lequel figure déjà votre adresse

- En cas de prescription via v-consult® : imprimer les étiquettes et les coller sur tous les documents

### Renvoi

Une fois l'enregistrement terminé, veuillez renvoyer l'appareil, avec le brassard encore connecté, le formulaire de demande d'analyses et le carnet du patient. Viollier prend en charge les frais de port.

- Via le Service clientèle – dépôt au cabinet
- Via DPD – dépôt dans un Pickup parcelshop → [dpgdgroup.com/ch/mydpd/parcel-shops](https://dpgdgroup.com/ch/mydpd/parcel-shops)
- Via la poste


Pour le renvoi du coffret, veuillez :

- Retirer l'étiquette de la fenêtre transparente
- Insérer l'étiquette correspondante (dans le coffret) dans la fenêtre transparente  
→ **l'adresse Viollier AG est visible**
- Fermer le coffret avec le clip de fermeture rouge

## Informations importantes

- **Ne pas mettre l'appareil en marche tant qu'il n'a pas été mis en place sur le patient. Ne pas effectuer de mesures test au préalable → l'appareil ne peut pas être remis en marche**
- Commander la taille appropriée de brassard chez Viollier :  
20 – 24 cm = taille Enfant | 24 – 32 cm = taille Standard | 32 – 40 cm = taille XL | 38 – 50 cm = taille XXL
- L'intervalle de mesure de l'appareil est pré-programmé :  
toutes les 15 min à partir de 06:00 h,  
toutes les 30 min à partir de 22:00 h
- En cas de mesures erronées ou de valeurs nettement trop élevées, une nouvelle mesure se déclenche automatiquement après 2 min
- Pour éviter de fausses mesures, laisser le bras immobile pendre le long du corps pendant la mesure de la tension artérielle
- Laisser les piles dans l'appareil, ne pas les retirer
- Les téléphones portables et les sources électromagnétiques puissantes peuvent influencer la qualité de l'enregistrement

## Mise en place de l'appareil

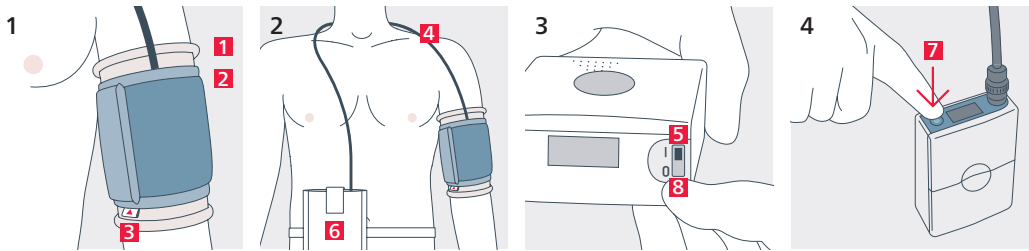

► VIOLLIER

### 1 Pose de l'appareil

- Enfiler le manchon textile **1** sur le bras gauche
- Poser le brassard **2** par-dessus le manchon textile et bien serrer
- La marque **3** doit être sur la face interne (artère) du bras

- ### 2
- Faire passer le tuyau à air **4** derrière la nuque puis le long du côté droit du corps  
→ **ne pas fixer le brassard et le tuyau à air à l'aide de ruban adhésif**
  - Placer l'appareil **6** dans l'étui de protection et le fixer avec la ceinture autour du ventre

### 3 – 4 Démarrage de l'appareil

- Mettre l'interrupteur noir **5** sur position I → ne plus éteindre l'appareil
- Déclencher la première mesure en appuyant sur le **bouton bleu 7**.  
Si la mesure s'effectue correctement, la valeur mesurée s'affiche sur l'écran de l'appareil.  
Si aucun résultat ne s'affiche sur l'écran et qu'un chiffre accompagné de la lettre E s'affichent, vérifier que le brassard est correctement fixé et, le cas échéant, le positionner à nouveau, puis déclencher une mesure en appuyant sur le bouton bleu
- Eteindre l'appareil au bout de 24 heures (position 0) **8**, l'enlever et le renvoyer



### Accessoires

- Appareil avec brassard connecté et piles incorporées
- Etui de protection avec ceinture abdominale
- Manchon textile pour le haut du bras
- Formulaire de demande d'analyses, carnet du patient et mode d'emploi
- Clip de fermeture rouge pour le renvoi